

## Manual för infällbart huvudstöd





Huvudstödet följer med som standard till modell TE och är ett tillbehör till modell MA och ZON. OBS! Sitt eller stå aldrig på huvudstödet!

1-2. Huvudstödet fästes i hålen på bänkens kortsida. Bänkar med huvudstöd levereras färdigmonterade.



3. Vid reglering av huvudstödet höjd, tryck det lilla handtaget i pilens riktning och sänk/höj huvudstödet med den andra handen.

4. Huvudstödsudden (A) går att flytta längs huvudstödsramen, och sitter på plats med kardborreband. Armstödet "Vaggan" (B), är ställbart i höjd med remmar och snäplåsning.

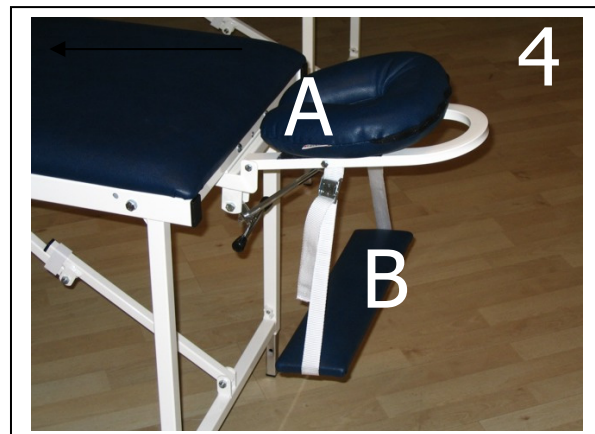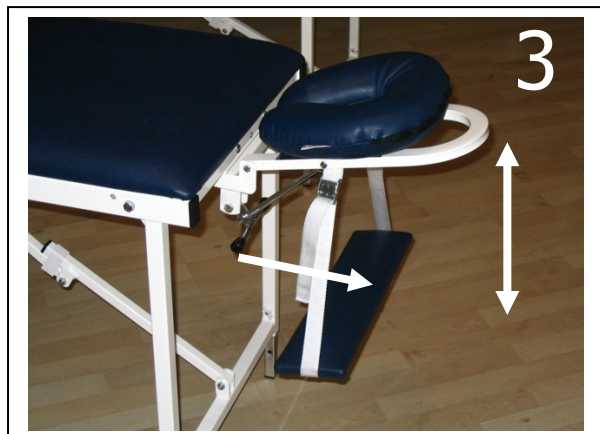

### OBSERVERA!

Vaggan är endast utformad för att stödja patientens armar under behandling. Den är inte anpassad för att patienten ska använda sig av denna för att resa sig upp. Om så sker kan skada uppstå på vaggan eller patienten.




Bilden visar det band som man kan vila armarna på. Finns på modell MA.

### Hopfällning av bänk med infällbart huvudstöd


5. Ta bort kudde och vagga. Dessa kan placeras inne i bänken när huvudstödet är infällt och bänken är hopvikt.

6. Vik metallstångens avslutande spärr (se cirkel, bild 6) parallellt med stången så att stången kan tas ur hålet i pilens riktning.

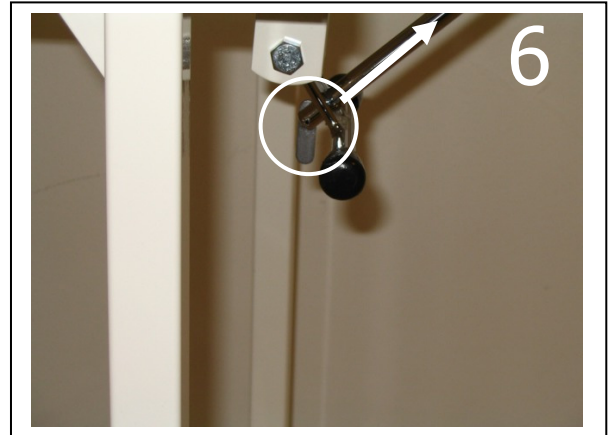



7. Fäll ner huvudstödet.

8. Dra låssprinten (se cirkel bild 8) i pilens riktning så att huvudstödsramen friläggs för infällning.

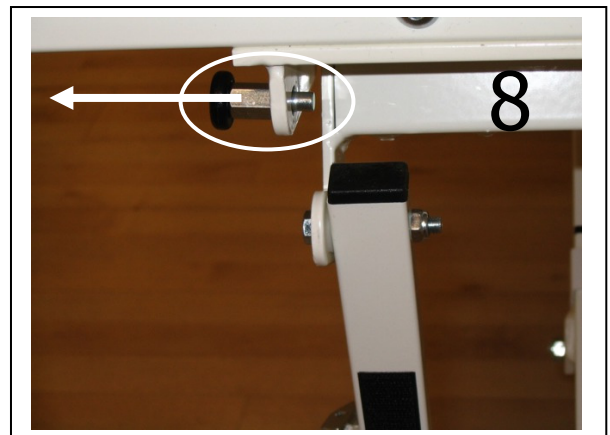

9. Fäll in bänkens benpar på den sida där huvudstödet är placerat.



10. Fäll in huvudstödet mot benets stag.

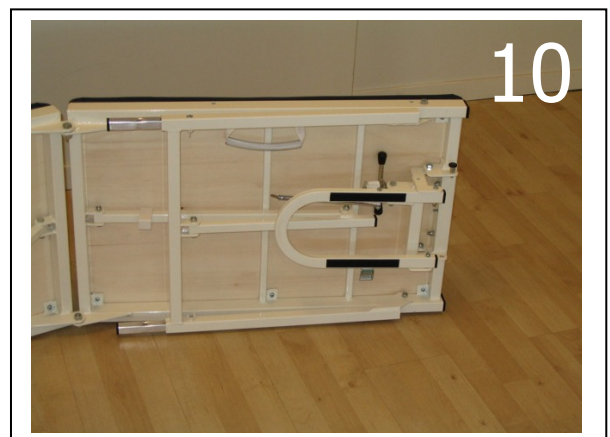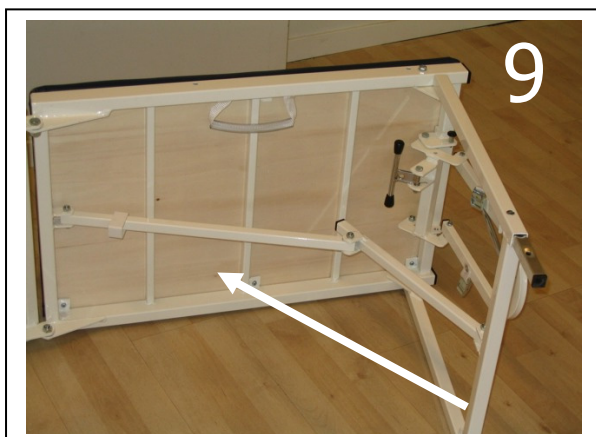

## ■ tarsus ■

11. Fäll in det andra benparet. Se till att handtaget på båda sidor viks upp mellan liggplan och ben.

12-13. När man ska vika ihop bänk med huvudstöd, trä in huvudstödet i det mellanrum som uppstår mellan stag och skiva/dyna. **Var aktsam så att inga fingrar hamnar i kläm!** Se till att låshylsorna ej klämmer mellan stag och dynans undersida, annars riskerar låshylsan och/eller dynans skiva att skadas.

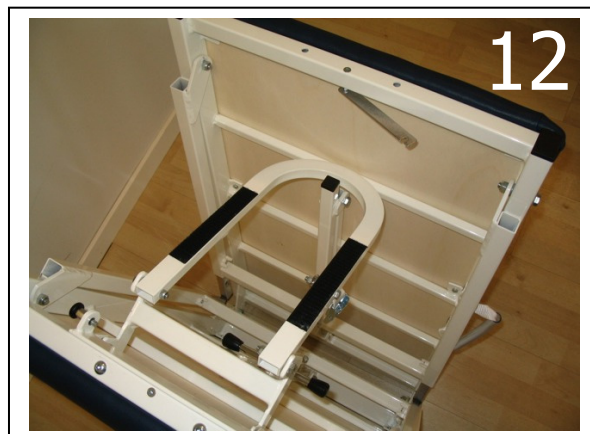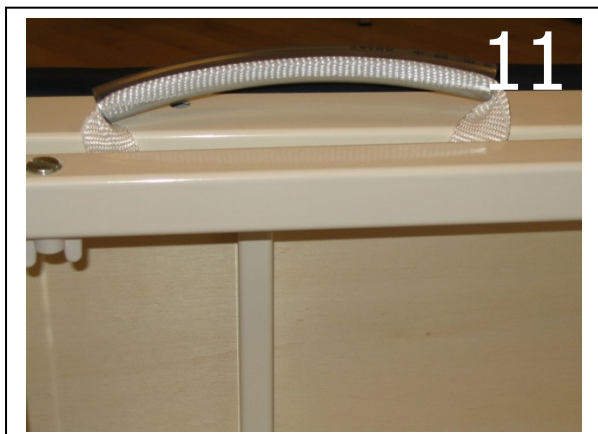

14. Tryck ihop bänken. Lås bänkens båda sidor med hjälp av låshaken.

15. Bänken är klar att bäras iväg.

