



MANUAL

För MA, TE och ZON



Obs!

Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

- **SE TILL att du inte fastnar med fingrarna i någon av bänkens leder eller mellan diagonalstagen!**
- **SE TILL att låshylsorna alltid är i rätt position när du använder bänken!**
- **SE TILL att metallen och träet i dynorna aldrig belastas över de rekommenderade gränser som vi har angett!**
- **SE TILL att bultar och muttrar alltid är ordentligt tillskruvade!**
- **SE TILL att inga vassa föremål skadar dynorna och tyget!**

VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL EN TARSUS BEHANDLINGSBÄNK!

Vi tror att du kommer att bli mycket nöjd med vår kvalitetsprodukt. Du är i gott sällskap. Tiotusentals användare runt världen har idag en bärbar bänk från Tarsus, många av dem använder sina bänkar dagligen.

Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö.

Om ett problem skulle uppstå är du alltid välkommen att kontakta oss, så att vi på bästa sätt kan avhjälpa problemet.

Vi ber er noggrant läsa igenom manualen, så att ni ska kunna använda behandlingsbänken på bästa sätt, till förmån både för er och bänken.

Personalen på Tarsus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bänkarnas användningsområden är behandling och undersökning av patient. Patienten skall sitta eller ligga på bänkarna. Använd inte bänken för något annat syfte eller på något annat sätt!

DYNOR

För längsta livslängd, se till att inga vassa föremål skär sönder tyget på dynorna och att träskiva och aluminiumramen inte överbelastas (se punkterna 25-26, maxlast).


RENGÖRING

Konstlädret rengörs med vanlig tvällösning (tvål & vatten). Man ska vara noga med att torka torrt efteråt. Behöver man desinficera kan man använda sig av en svag spritlösning (alltför stark spritlösning torkar ut konstlädret alltför snabbt och förkortar dess livslängd). Ytdesinfektion finns att köpa på Apoteket. Efter desinficering, torka av med tvällösning och avsluta med att torka ordentligt torrt.

UPPFÄLLNING AV BÄNK UTAN HUVUDSTÖD

OBS! Var noga med att följa instruktionerna steg för steg när du fäller upp bänken!


1. Fäll upp låshaken (A).
2. Vik ut bänken. Om man föredrar att ha bänken på golvet när man öppnar den (som på bilden) rekommenderas ett mjukt underlag för att undvika repor på golv och bänk. Skador som orsakas på golv eller bänk under uppställning ersätts ej.

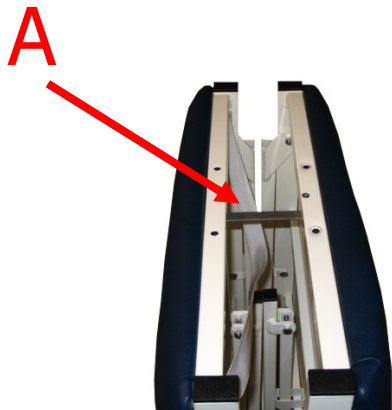

1



3. Skruva bort vingmuttern (B), drag ut bulten (C). Justera innerbenet till önskat läge. Skruva därefter fast bult och vingmutter.
4. Tryck fast diagonalstagen i låst läge.

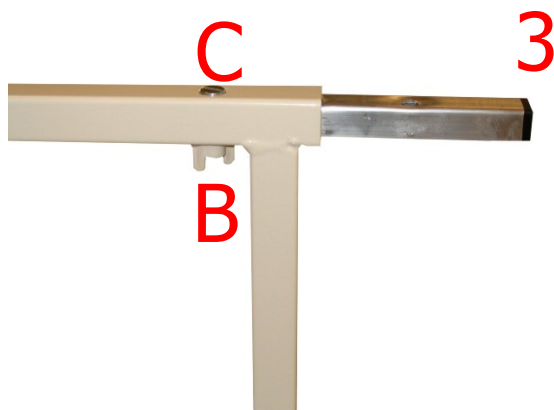

- 5-6 För låshylsan (se cirkel) över båda stagen så att dessa låses fast. Om bänken INTE är korrekt uppmonterad så är diagonalstagen inte helt uppspända och låshylsan placerad fel.



OBS! BÅDA stagen MÅSTE vara fullt sträckta och låshylsan MÅSTE låsa BÅDA stagen innan en patient placeras på bänken. Om inte stagen är fullt sträckta och låsta kan bänken kollapsa eller tippa, och därmed orsaka personskada.


HOPFÄLLNING AV BÄNK UTAN HUVUDSTÖD

- 7-8 Fäll ihop stagen och vik ihop benparen (motsatt ordning bild 3-6).
Se till att handtaget viks upp mellan liggplan och ben (som på bild 8), annars går det inte att bära bänken.




Vik ihop bänken. Se till att låshylsorna inte kläms fast mellan stagen och dynans undersida, annars riskerar låshylsan och/eller dynans skiva att skadas.

9. Fäll ihop bänken.
10. Lås med låshaken (A).

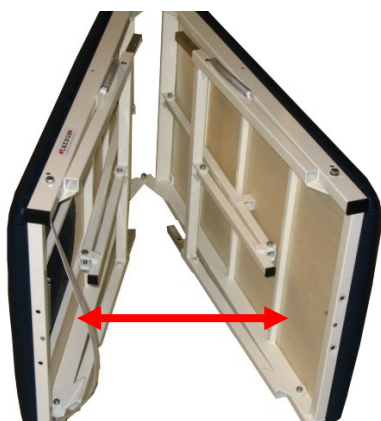

9

A

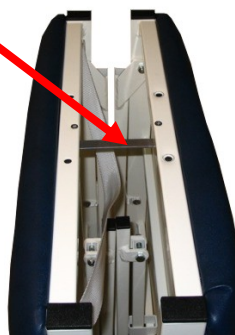

10

Bänken är färdig att bäras iväg.



OBS!

Se till att du inte fastnar med fingrarna i någon av bänkens leder eller mellan diagonalstagen när du fäller upp eller ihop bänken!


HUVUDSTÖD OCH ARMVAGGA

Huvudstödet följer med till modell TE och finns som tillbehör till modell MA och ZON.




OBS! Sitt eller stå **ALDRIG** på huvudstödet! Om så sker kan skada uppstå på bänken och/eller patienten.

11-12. Huvudstödet fästes i förborrade hål på bänkens kortsida. Bänkar med huvudstöd levereras monterade.

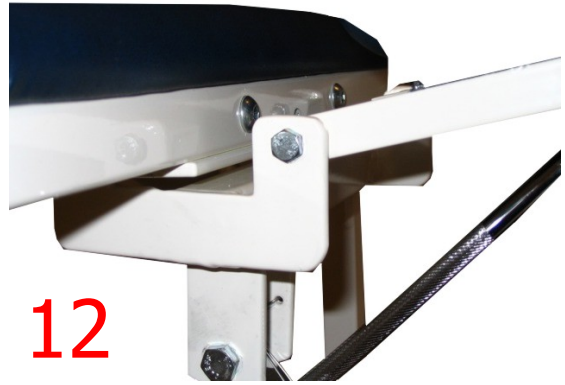

13. Dra huvudstödet uppåt eller nedåt till rätt höjd. Huvudstödet högsta läge uppnås genom att lätta på sprinten (se cirkel).

14. Huvudstöds-kudden (A) går att flytta längs huvudstödsramen, och sitter på plats med kardborreband. Armstödet "Vaggan" (B), är ställbar i höjd med remmar och snäpplåsning.

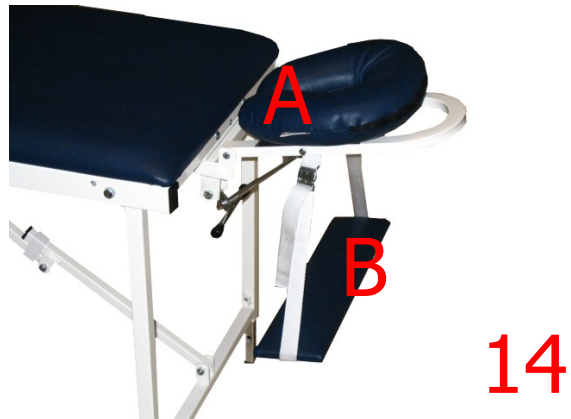

OBS!

Vaggan är endast utformad för att stödja patientens armar under behandling. Den är inte anpassad för att patienten ska använda sig av denna för att resa sig upp. Om så sker kan skada uppstå på bänken eller patienten.



Bilden visar det band som utgör armstöd på modell MA och ZON.

REGLERING AV RYGGSTÖD

15. Ryggstödet regleras med gaskolv

16. Dra handtaget mjukt i pilens riktning för reglering av ryggstödet. Hjälp samtidigt dynan uppåt/nedåt med andra handen.



17. OBS! Placera **aldrig** handen mellan ryggstöd och liggplan vid sänkning av ryggstödet, så att du inte klämmer dig!

18. Vid liggande behandling, kontrollera att det uppfällbara ryggstödet är helt nedfällt innan patienten lägger sig på bänken.



OBS!

Sitt eller stå **ALDRIG** på ZON-bänkens ryggstöd. Ryggstödet är inte anpassat för detta.


Om så sker kan skada uppstå på bänken eller patienten.

HOPFÄLLNING AV BÄNK MED INFÄLLBART HUVUDSTÖD

Ta bort kudde och vagg. Dessa kan placeras inne i bänken när huvudstödet är infällt och bänken är hopvikt.

19. Den räfflade stången har två lägen, lång och kort. Huvudstödetets högsta läge uppnås genom att lätta på sprinten (se pil). OBS! Det är viktigt att sprinten går i sitt läge (man hör ett klickande ljud).

20. Dra sprinten utåt så att stången hamnar i "kort läge". Ta tag i den räfflade stången (A) med ena handen och fästet (B) med andra. Dra stången ur hålet i fästet.

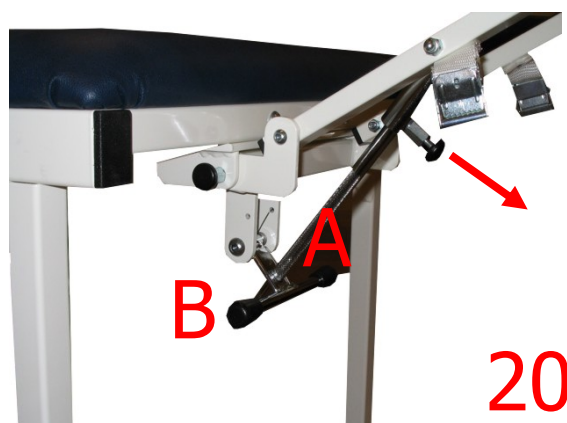


21. Fäll ner huvudstödet.

22. Dra båda låssprintarna utåt så att huvudstödsramen friläggs för infällning.



23. Fäll in bänkens båda benpar.

24. Se till att handtagen viks upp mellan liggplan och ben på båda sidor.

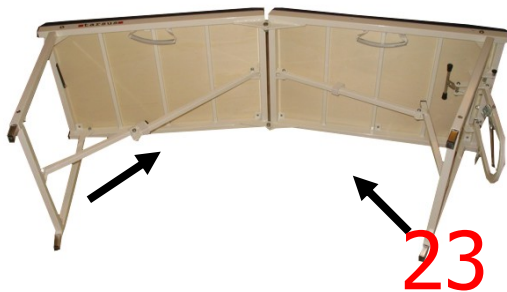


25. Vik ihop bänken som bilden visar, och ställ den sedan på högkant (med bänkens mitt ned mot golvet).

26.



(För MA och TE): Trä in huvudstödet u-formade båge i det mellanrum som uppstår mellan stag och skiva/dyna. **Var aktsam så att inga fingrar hamnar i kläm!**

(För ZON): Vik endast in huvudstödet mot staget (se bild 24). Trä INTE in det bakom staget, eftersom det inte finns plats för detta på ZON-bänken.

Se också till att låshylsorna ej klämmer mellan stag och dynans undersida, annars riskerar låshylsan och/eller dynans skiva att skadas.

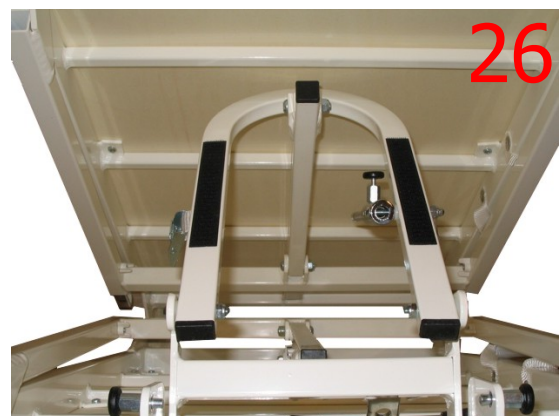

27-28. Tryck ihop bänken. Lås bänkens båda sidor med hjälp av låshaken (A).

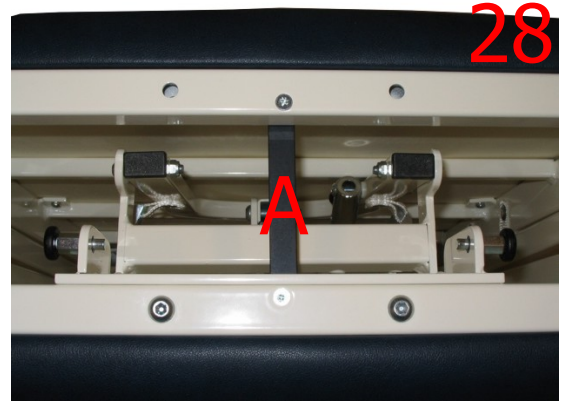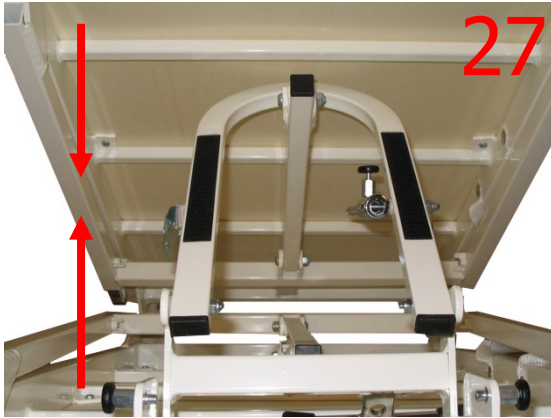

29. Bänken är klar att bäras iväg.

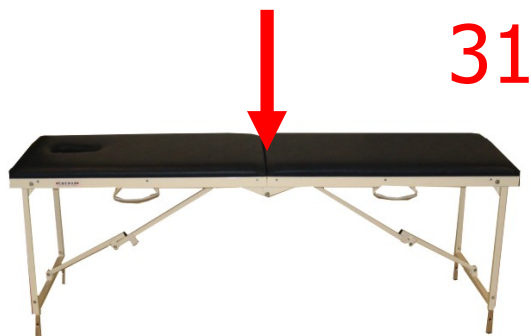


Bild 30. OBS! Placera ej några större föremål under bänken som riskerar att stöta till stagen och få dem att gå isär. Detta kan få bänken att kollapsa och orsaka skada på patient och/eller bänk.


27-30. REKOMMENDERAD BELASTNING

Modell MA och ZON

Maximal last mitt på bänken
150 kg



Maximal last jämnt fördelad
200 kg

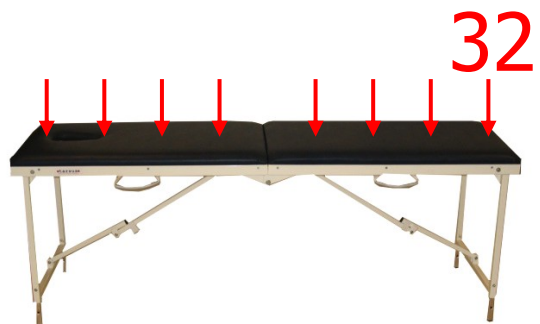


Modell TE

Maximal last mitt på bänken
200 kg



Maximal last jämnt fördelad
250 kg

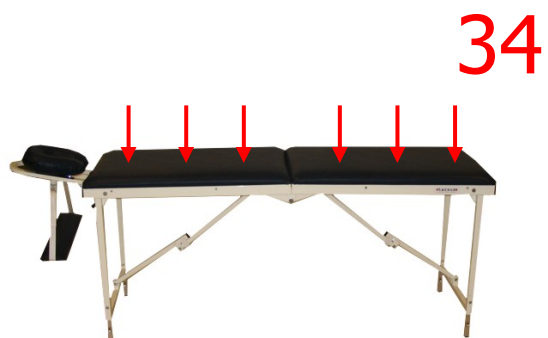

OBS!

Belasta inte bänken över de rekommenderade gränserna enligt ovan.
Överbelastning kan innebära skada på patient och/eller bänk.

Garantivillkor

Alla våra bärbara bänkar har **10** (tio) års garanti på stativet och **2** (två) års garanti på övriga detaljer. Garantin avser funktion, material och tillverkning och gäller under förutsättning att produkten brukats i enlighet med de instruktioner som finns i manualen.

Garantin är giltig från och med det datum som finns på bänkens CE-märke.

Se till att du är rädd om det CE-märke som sitter på din bänk, eftersom det är din bänks "identitet". För att inte riskera att du tappar CE-märket rekommenderar vi att du skriver ner CE-nummer, ordernummer och serienummer. Bilden visar var respektive nummer är placerat på CE-märket.

Datum (A)

Ordernummer (B)

Serienummer (C)

D visar bänkens modell (001=MA, 002=TE, 003=ZON) och bredd i cm.



DATE/ORDER
SERIAL NO.

A

B

D

C

TARSUS PRODUCTS AB
MYRÄNGSVÄGEN 8
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN PHONE(+46) 660 – 84251

